

HEMATURIA DETECTION

technology by
blücare



PARA LA DETECCIÓN DE LA HEMATURIA EN GATOS



RECOMENDADO EN CASO DE

- Gato con enfermedad del tracto urinario inferior felina (FLUTD) y hematuria, por primera vez o de forma recurrente, en los análisis de orina.
- Gato que muestra desórdenes de eliminación, para ayudar a diferenciar entre causas médicas y de comportamiento.



Ayuda a detectar la hematuria, que está presente en la mayoría de los desórdenes urinarios felinos.




Un sobre de Hematuria Detection permite comprobar a diario la presencia de sangre en la orina del gato hasta de 3 semanas*.



Fácil de usar y no causa estrés ya que se utiliza con la arena habitual del gato.

PROTOCOLO RECOMENDADO PARA GATOS CON FLUTD

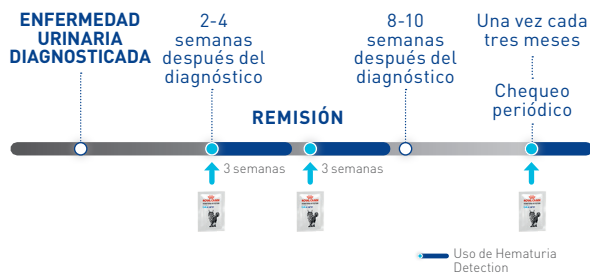

Disponible en cajas de 2 sobres de 20 g

INSTRUCCIONES DE USO**



EXTIENDE los gránulos sobre la arena higiénica del gato.



EXAMINA la bandeja de arena después de que el gato orine. Los gránulos en contacto con la orina se hinchan. Si se detecta sangre, se produce una reacción.



SI LOS GRÁNULOS PERMANECEN DE COLOR BLANCO, el test es negativo.



SI LOS GRÁNULOS SE VUELVEN DE COLOR AZUL, el test es positivo y muestra la presencia de sangre en la orina del gato.



El propietario deberá realizar una **CONSULTA** al veterinario.

* Se consigue la máxima duración (hasta 3 semanas) con arena higiénica aglomerante de alta calidad siempre y cuando se extraigan a diario las heces y la orina aglomerada.

** Por favor, consulta siempre las instrucciones de uso.

INDICACIONES: Hematuria Detection ayuda a detectar la presencia de sangre en la orina felina, un signo de la mayoría de los desórdenes urinarios felinos. Hematuria Detection se presenta en forma de pequeños gránulos blancos, fáciles de extender por la arena higiénica del gato.

IMPORTANTE: Hematuria Detection se puede utilizar con la mayoría de las arenas higiénicas disponibles en el mercado. Para obtener los mejores resultados posibles, es preferible utilizar arena higiénica aglomerante de arcilla (bentonita). Los resultados de la prueba podrían alterarse si el gato orina varias veces sobre los mismos gránulos. Es muy recomendable limpiar la arena higiénica (retirar la orina aglomerada y los excrementos) a diario. Cambia la arena según las instrucciones del fabricante. Una vez distribuidos por la arena y antes de entrar en contacto con la orina, los gránulos de Hematuria Detection mantienen su efectividad en la bandeja durante 30 días o hasta que entran en contacto con orina. En caso de que la orina del gato contenga muy pocos glóbulos rojos, o si la orina tiene un pH alto o es de una densidad extrema, es posible que los gránulos no reaccionen.

COMPOSICIÓN: Los gránulos de Hematuria Detection contienen tetrametilbencidina (TMB), una molécula estudiada por veterinarios, que hace cambiar el color de los gránulos de blanco a azul cuando entran en contacto con la hemoglobina.

PRECAUCIONES: Lee detenidamente las instrucciones antes de realizar la prueba, ya que los resultados solo podrán interpretarse correctamente si se han seguido todas las instrucciones y recomendaciones. Cada sobre es de un solo uso. No utilices el sobre si está abierto o dañado. Coloca la bandeja de arena del gato en una habitación ventilada. Retira la orina aglomerada y las heces a diario con una pala especialmente indicada. Lávate las manos con jabón después de verter y extraer los gránulos. Solo para uso externo. No se debe ingerir el producto. Almacenar los gránulos en un lugar seco, mantenerlos a temperatura ambiente y protegidos de la luz del sol. Puedes desechar los gránulos sucios como cualquier otro residuo. Atención: Las bolsas de plástico pueden resultar peligrosas. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga la bolsa alejada de bebés, niños y mascotas.

ATENCIÓN: Los resultados no sustituyen el asesoramiento de un veterinario, ni constituyen un tratamiento médico. Los resultados de la prueba pueden variar en función de las condiciones de uso y otros factores, como la dieta y la medicación del gato. Las pruebas tienen sus limitaciones, falsos positivos y falsos negativos. No se garantiza la precisión de los resultados. Conforme a disposiciones públicas vigentes, la responsabilidad de Royal Canin SAS y Blücare Laboratories Inc. con respecto a cualquier reclamación derivada de, o relacionada con, el producto o su uso se limitará al precio pagado por la compra de una unidad del producto que haya ocasionado dicha reclamación. Si tiene alguna pregunta o comentario, contacta con atención al cliente, tal y como se indica en el envase.

HEMATURIA DETECTION

