

HEMATURIA DETECTION

technology by
blücare



Disponível em caixas de 2 saquetas de **20 g**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**



ESPALHE os grânulos sobre a areia higiênica do gato.



EXAMINE a caixa de areia depois do gato urinar. Os grânulos em contacto com a urina aumentam de tamanho. Se for detetado sangue, produz-se uma reacção.



SE OS GRÂNULOS PERMANECEM DE COR BRANCA, o teste é negativo.



SE OS GRÂNULOS ADQUIREM A COR AZUL, o teste é positivo e mostra a presença de sangue na urina do gato.



O tutor deverá realizar uma **CONSULTA** com o médico veterinário.

* É possível alcançar a máxima duração (até 3 semanas) com areia higiênica aglomerante de elevada qualidade sempre e quando as fezes e urina aglomerada sejam extraídas diariamente.

** Consulte sempre as instruções de utilização.

PARA A DETECÇÃO DA HEMATÚRIA EM GATOS



RECOMENDADO EM CASO DE

- Gato com doença do trato urinário inferior felino (FLUTD, Feline lower urinary tract disease) e hematuria, por primeira vez ou de forma recorrente, nas análises de urina.
- Gato que apresenta distúrbios de eliminação, para ajudar a diferenciar entre causas médicas e de comportamento.



Ajuda a detetar a hematuria, que está presente na maioria dos distúrbios urinários felinos.




Uma saqueta de HEMATURIA DETECTION permite comprovar, diariamente, a presença de sangue na urina do gato até 3 semanas*.



De fácil utilização e sem provocar ansiedade e adaptação a mudança já que se utiliza com a areia habitual do gato.

PROTOCOLO RECOMENDADO PARA GATOS COM FLUTD

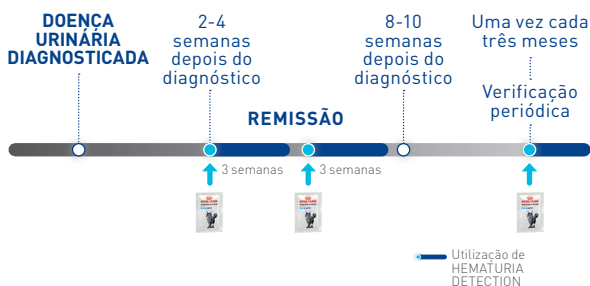

INDICACIONES: HEMATURIA DETECTION ajuda a detetar a presença de sangue na urina felina, um sinal da maioria dos distúrbios urinários felinos. HEMATURIA DETECTION apresenta-se sob a forma de pequenos grânulos brancos, fáceis de espalhar pela areia higiênica do gato.

IMPORTANTE: HEMATURIA DETECTION pode ser utilizado com a maioria das areias higiênicas disponíveis no mercado. Para obter os melhores resultados possíveis, é preferível utilizar areia higiênica aglomerante de argila (bentonite). Os resultados do teste podem ser alterados se o gato urinar várias vezes sobre os mesmos grânulos. É muito recomendável limpar a areia higiênica (remover a urina aglomerada e as fezes) diariamente. Mude a areia de acordo com as instruções do fabricante. Uma vez distribuídos pela areia, e antes de entrar em contacto com a urina, os grânulos de HEMATURIA DETECTION mantêm a sua eficácia na caixa de areia durante 30 dias ou até que entrem em contacto com a urina. Caso a urina do gato contenha muito poucos glóbulos vermelhos, ou se a urina tiver um pH alto ou for de uma densidade extrema, é possível que os grânulos não reajam.

COMPOSIÇÃO: os grânulos de HEMATURIA DETECTION contêm tetrametilbenzidina (TMB), uma molécula estudada por médicos veterinários, que provoca a mudança da cor dos grânulos de branco a azul quando entram em contacto com a hemoglobina.

PRECAUÇÕES: leia atentamente as instruções antes de realizar o teste, já que os resultados apenas poderão ser interpretados corretamente se foram seguidas todas as instruções e recomendações. Cada saqueta é de utilização única. Não utilize a saqueta se estiver aberta ou danificada. Coloque a caixa de areia do gato num quarto ventilado. Remova diariamente a urina aglomerada e as fezes com uma pá especialmente indicada. Lave as mãos com sabão depois de verter e extrair os grânulos. Apenas para uso externo. Não se deve ingerir o produto. Armazenar os grânulos num local seco, mantendo-os à temperatura ambiente e protegidos da luz solar. Pode eliminar os grânulos sujos como qualquer outro resíduo. Atenção: os sacos de plástico podem ser perigosos. Para evitar o risco de asfixia, mantenha o saco afastado de bebés, crianças e animais de estimação.

ATENÇÃO: os resultados não substituem os conselhos de um médico veterinário, nem constituem um tratamento médico. Os resultados do teste podem variar em função das condições de utilização e outros fatores, como a dieta e a medicação do gato. Os testes têm as suas limitações, falsos positivos e falsos negativos. Não se garante a precisão dos resultados. De acordo com as disposições públicas vigentes, a responsabilidade da Royal Canin SAS e Blücare Laboratories Inc. em relação a qualquer reclamação derivada de, ou relacionada com o produto ou a sua utilização, limitar-se-á ao preço pago pela compra de uma unidade do produto que tenha ocasionado a dita reclamação. Se tiver alguma pergunta ou comentário, entre em contacto com o apoio ao cliente

HEMATURIA DETECTION

